

INJECTION PAD

Selbstklebendes Pflaster mit blutstillender Wundauflage (Wundschutz) EO-Gas-sterilisiert

Hergestellt in Japan

STERILE EO Sterilized by E.O.G.
 Do not reuse
 





Angemessene Kompression und Schutzabdeckung Mit einem Handgriff zu bedienende spezielle Verpackung Einzel sterilisiert mit EO-Gas

Klebebänder mit blutstillenden Wundauflagen: die Wundauflagen bestehen aus Vliesstoff aus Zellulosematerialien; die Klebebänder bestehen aus Vliesstoff, der hauptsächlich aus Zellstoff und Polyester hergestellt wurde, mit zusätzlichem Acryl-Haftklebstoff.

■ Spezifikationen

Produkt- nummer	Größe		pro Schachtel
	Klebefläche	Wundauflage	
White No.30	φ 30 mm	φ 10 mm	120 Stück
White No.36	φ 36mm	φ 16 mm	100 Stück
Beige No.30A	φ 30 mm	φ 10 mm	120 Stück
Beige No.36A	φ 36 mm	φ 16 mm	100 Stück



Hygienische Packung, die ausgepackt werden kann, ohne die Wundauflage zu berühren

Eigenschaften

Anwendung


Angemessene Kompressionswirkung

Verwendet Zellulosevlies mit exzellenter Absorption, die Stärke von 3 mm bietet die richtige Kompressionswirkung

Sicherung

Klebefläche, die sanft zur Haut ist und gut hält

Sterilisierte Einzelverpackung – fertig zur Anwendung
Wir verwenden Nichiban Chirurgisches Klebeband 21N, das einen guten Ruf für exzellente Haftkraft und lange Lebensdauer genießt.
Löst sich aufgrund der runden Form nicht einfach ab. Sicher durch hypoallergenen Kleber.

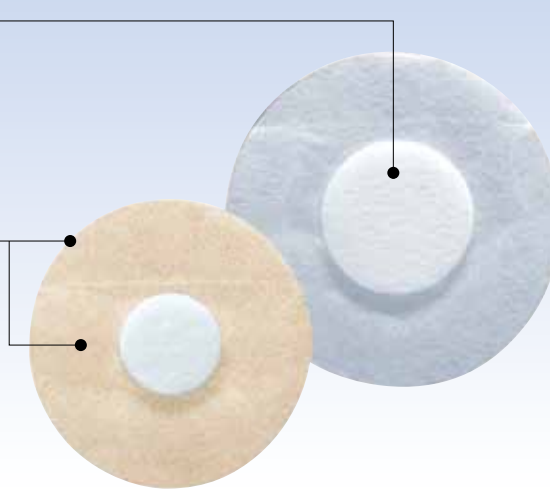

Verpackung

Hygienisch zu öffnen

Hygienische Verpackung, durch die sowohl Wundauflage als auch Sicherungsteil angebracht werden können, ohne sie dort zu berühren, wo sie in Kontakt mit dem Patienten kommen.

Sterilisierte Einzelverpackung, mit einem Handgriff anwendbar (Sterilisation mit Ethylenoxid-Gas)

Pflaster für Pflaster steril verpackt. Verhindert Keiminfektionen durch Anwendung mit einem Handgriff. Trägt zur Arbeitseinsparung bei.



Nach intravenösen Injektionen, Blutentnahmen und Impfungen

Anwendung

- Schutzabdeckung nach einer intravenösen Injektion, Blutentnahme oder Impfung
- Schutzabdeckung nach Arthrozentese.

Verwendungsweise




Öffnen Sie die Verpackung



Entnehmen Sie das Injektionspflaster, das mit einem Teil im Inneren der Verpackung klebt, indem Sie es an dem Teil mit Schutzpapier auf der Rückseite festhalten.



Bringen Sie es an der Einstichstelle an, indem Sie es weiterhin an dem Teil mit Schutzpapier auf der Rückseite festhalten.

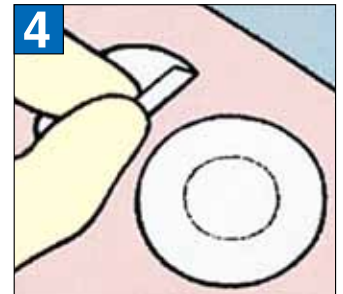

Kleben Sie es vollständig auf die Hautoberfläche auf, indem Sie das auf einem Teil der Rückseite verbleibende Schutzpapier entfernen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Falls die Wunden während der Verwendung des Produkts klinisch infiziert werden, beenden Sie bitte die Verwendung und lassen Sie sich entsprechend behandeln.
- Falls es während der Verwendung des Produkts zu Hautläsionen (z. B. Ausschlägen, Rötungen oder Jucken) kommt, beenden Sie bitte die Verwendung und lassen Sie sich entsprechend behandeln.
- Falls das Produkt nass oder verschmutzt wird, oder falls Blut oder abgesonderte Flüssigkeit auf die Wundauflage austritt, nehmen Sie es bitte ab und bringen Sie sofort ein frisches Pflaster an.
- Falls das Produkt bei der Verwendung verunstaltet, beschädigt oder nass wird, ziehen Sie es bitte ab.
- Das Produkt sollte sofort verwendet werden, nachdem die Versiegelung aufgebrochen wurde.
- Ziehen Sie das Pflaster langsam in Wuchsrichtung Ihrer Körperbehaarung ab, um Hautverletzungen beim Entfernen zu vermeiden.

Lagerung dieses Produkts

- Bei Raumtemperatur, nicht in der Nähe von Wasser, hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und direktem Sonnenlicht lagern.